

取扱説明書

【プロハードスリム】

商品についてのお問合せ先
 ◆ダイヤ工業株式会社 CSセンター
 〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1117-1
 TEL(0120)01-1245 FAX(0120)02-1246

商品特徴

背部が幅広く腹部は幅細い、急性期腰痛から慢性期腰痛までさまざまな症状にご使用いただけます。背部に4本細型(PP)ステーで腰をサポートします。本製品は、肌着や服の上から装着することを想定しております。

装着時間目安

使い始めは1~2時間程度装着し、不快感や皮膚にかゆみがないか確認して下さい。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避け下さい。

▲ 注意

- この取扱説明書に示した目的以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 面ファスナーを衣服に引掛けて傷付けないようにご注意ください。
- 本品には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談下さい。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

保管方法

- 直射日光を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。

廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。(地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体にご確認下さい。)

検品印 	適用	LL 95~120cm	素材表示
	腸骨	L 80~100cm	
	周囲	M 68~85cm	
		S 58~73cm	

本体：ポリエステル・ナイロン
 ポリウレタン
 前立て：ポリエステル・ナイロン
 ベルト通し：ポリアセタール
 面ファスナー、ベルト：ナイロン
 芯材：ポリエチレン(PE)
 ポリプロピレン(PP)

ロット
 No. 402527


装着方法

QT01-48-R00

- 1 面ファスナーを外し、商品を広げます。
 ベルト面ファスナー



- 2 本体をしっかりと引張ります。腸骨(腰の一番出ている骨)が本体幅の中央になるように合わせます。

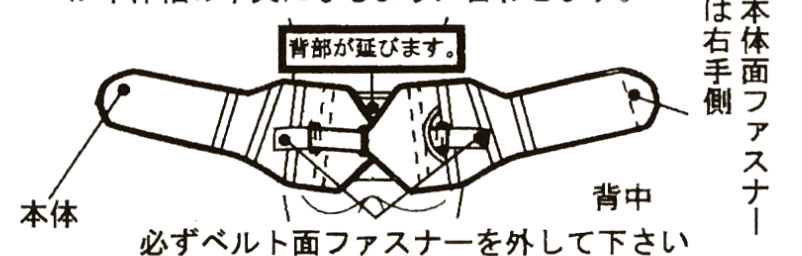

- 3 本体面ファスナーを腹部でとめます。その上にベルトを適度に引張り腹部にとめます。



- 4 腰部に適度なテンションがかかり、装着位置が正しいか確認して下さい。

