

**【DARWING SATT】**

DARWING SATTは、長時間の中腰姿勢や前屈動作時の腰をサポートします。  
製品についてご不明な点がございましたら、下記宛までご連絡下さい。

装着時間目安

使い始めは1～2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認して下さい。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避け下さい。

**△ 注意**

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 面ファスナーを衣服に引掛けて傷付けないようにご注意ください。
- 肌面には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談下さい。
- 骨盤ベルト部分の滑り止め生地は、製造上の都合により表面生地と仮貼りしておりますが、仮貼りが外れた場合も品質上問題なく使用していただけます。
- 移乗にご使用の際は、介護者を肩ベルトのカクカン等で傷つけないようご注意ください。
- 無理な体勢での使用は、介護者にベルトを引っ張られる等の原因となり、転倒の恐れがありますのでお止め下さい。
- 製品を肌に直接装着しないで下さい。
- 生地の変色、破れやほつれ等を発見した場合は使用を中止し、新しい製品をお買い求め下さい。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
  - 漂白剤・柔軟剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
  - 洗濯後の乾燥は、陰干しして下さい。
  - パッドは抜いて洗濯をして下さい。
- ※濡れた状態で放置すると、他の物に色移りする場合がありますのでご注意ください。


保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。
- 高温になる場所での使用は、変形や変色の原因となりますのでお止め下さい。

廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。
- (地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。)


適用範囲	M (オレンジ)	L (グリーン)	LL (ブラック)
身長	148cm～166cm	166cm～185cm	180cm～198cm
仙骨周囲	75cm～95cm	95cm～115cm	105cm～125cm

ご連絡先  
 **ダイヤ工業株式会社**  
 〒701-0203 岡山市南区古新田 1125  
 フリーダイヤル フリーファックス  
 ☎0120-76-1245 ☎0120-02-1246  
 Lot,No

素材表示  
 ポリエステル  
 ナイロン  
 ポリウレタン  
 ポリプロピレン  
 綿

装着方法

商品展開図

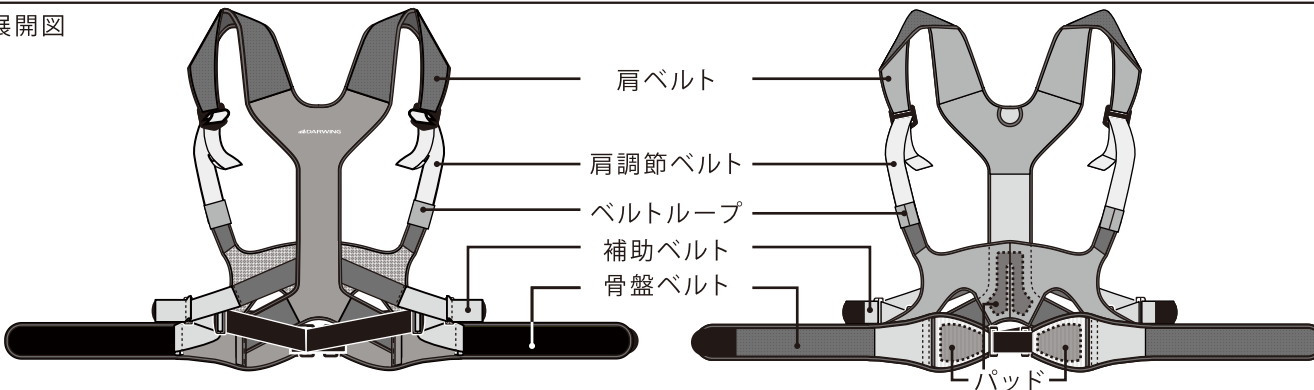


装着準備


肩調節ベルトを緩めます




補助ベルトをはがします

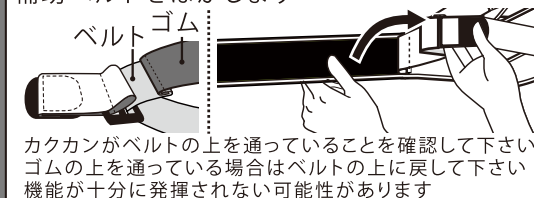


骨盤ベルトを引っ張ります

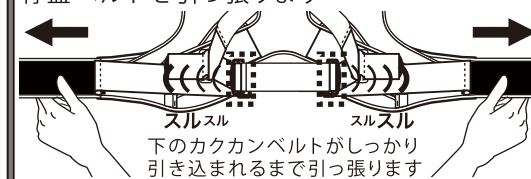


肩ベルトを腕から通し、骨盤ベルトを骨盤にあてがいます

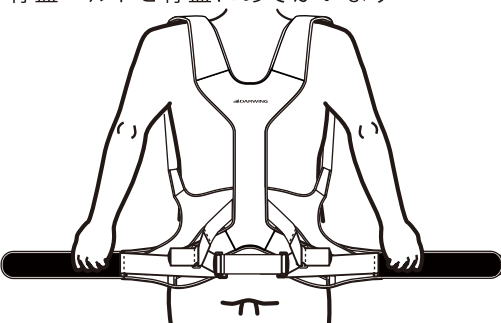


骨盤周りに巻きつけます  
 足を上げて足の付け根を確認し、ベルトの下部を合わせます

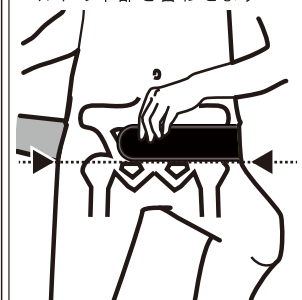


骨盤ベルトをとめます

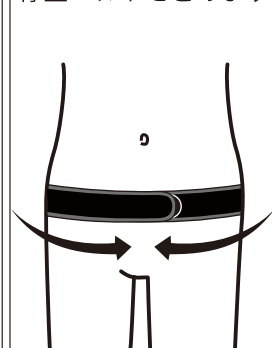


背面の補助ベルトを持ちます

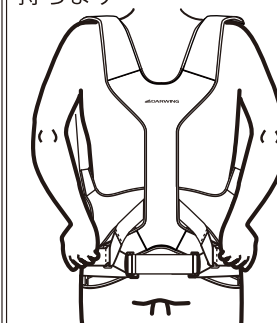


補助ベルトを引っ張ってとめます

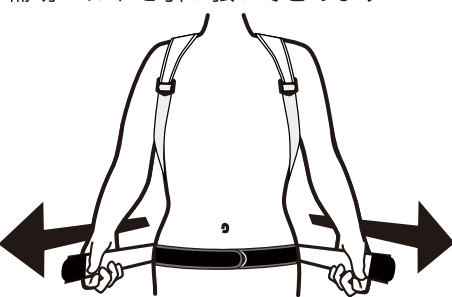

肩調節ベルトを引っ張って調整します

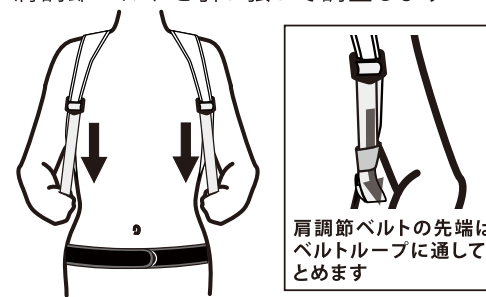

装着完了

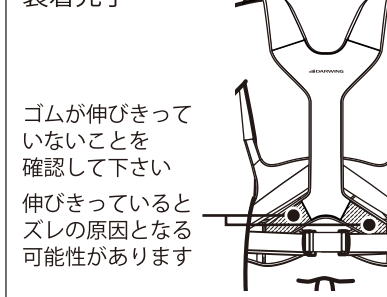

※ベルト緩める際は、肩調節ベルト⇒補助ベルトの順に緩めて下さい。