

## DARWING 取扱説明書

### 【DARWINGセレクトVenus丸背タイプ】

本品は丸い背中気味の方の姿勢をサポートします。  
本品についてご不明な点がございましたら、下記宛までご連絡ください。

#### 装着時間目安

使い始めは1～2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認してください。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避けください。

#### ⚠ 注意

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止めください。
- 方が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談ください。
- 生地劣化(伸び・縮み・変形等)・破れ・ほつれ等が発生した場合、機能を感じにくくなる場合がありますので、その場合は新しい製品をお買い求めください。

#### 洗濯方法

- 40℃以下の水で洗濯ネットを使用し洗濯機で弱めに洗濯してください。
- 漂白剤・蛍光増白剤・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は、形を整えて陰干しにしてください。
- プリント部分以外はスチームなしで当て布を使用し、底面温度110℃以下でアイロンが可能です。
- 本品は色落ちや色移りの可能性があるため、ご注意ください。

#### 保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管してください。
- 高温になる場所でのご使用は変形や変色の原因になるのでお止めください。


#### 廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄してください。  
(地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。)

#### 装着方法

QT14-107 R00

##### 1 本品を広げる

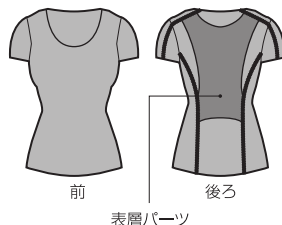


##### 2 前後に気を付けて装着

表層パーツや縫製ラインが  
図になるように裾側から装着する。



#### ■ 装着注意点 ■

シワやヨレが無いように装着後に鏡等で見ながらしっかり確認を行う。

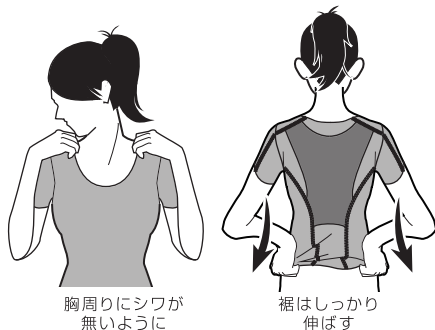

ご連絡先



ダイワ工業株式会社

〒701-0203 岡山市南区古新田 1125

フリーダイヤル

フリーアクセス

☎0120-76-1245 ☎0120-02-1246

Lot.No

素材表示

ナイロン  
ポリウレタン