

bonbone 取扱説明書

【ワンタッチかぐや姫】

使いすぎによる親指・手首の痛みをサポートします。商品についてご不明な点がございましたら下記宛までご連絡下さい。

装着時間目安

使い始めは1～2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認して下さい。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避け下さい。

装着方法

QT10-26-R04

⚠ 注意

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 面ファスナーを衣服に引掛けて傷付けないようにご注意ください。
- 肌面には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談下さい。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。
- 高温になる場所でのご使用は変形や変色の原因になるのでお止め下さい。
- 生地は強く摩擦するとはがれる場合があります。

廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。(地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。)

	親指周囲	手首周囲	素材表示	ナイロン・ポリウレタン
L	6～7.5cm	17～20cm	ご連絡先 ダイヤ工業株式会社 〒701-0203 岡山市南区古新田 1125 フリーダイヤル フリーファックス ☎0120-01-1245 ☎0120-02-1246	
M	5.5～7cm	15～18cm		
S	5～6cm	13～16cm		

Lot. No

505746

1 商品に親指を通します。

親指の根元までしっかりと入れ込んで下さい。



2 手首部分の面ファスナーを引張って装着します。

動きを制限したい方向にベルトを引張り調節することによりサポート力がアップします。手首部のフックに親指を差し込むと簡単に装着できます。



3 装着完了

面ファスナーを手首部分にまきつけることでしっかり固定できます。

