

bonbone 取扱説明書

【スリムリストバンド141】

日常生活でご使用頂ける、スリムでシンプルなリストバンドです。細幅ベルトが手首にしっかりフィットし、パッドで的確に圧迫をかけられます。手首をしっかり安定させ力が入りやすくなります。商品についてご不明な点がありましたら、下記宛までご連絡下さい。

装着時間目安

使い始めは1～2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認して下さい。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避け下さい。

△ 注意

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 面ファスナーを衣服に引掛けて傷付けないようにご注意ください。
- 肌面には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談下さい。
- 水、汗、摩擦によって多少の色落ちや色移りする場合がありますのでご注意ください。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。

廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。
(地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。)

検品印



ご
連
絡
先
ダイヤ工業株式会社
CSセンター
〒701-0203 岡山市南区古新田1117-1
TEL(086)282-1245 FAX(086)282-1246

Lot. No

421591

素材表示


ナイロン
ポリエステル
ウレタンフォーム
ポリエチレン
ポリアセタール

装着方法

QT10-22-R01

1 製品を広げます

本体の面ファスナーを外し、輪を広げます。

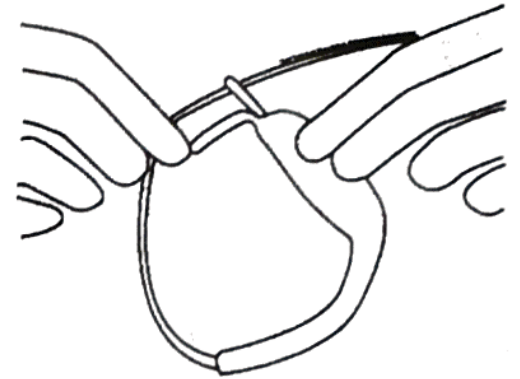


2 製品を手に通します

手首まで通しパッドの位置を合わせます。



3 装着完成

ベルトを引張り、強さの調節をして面ファスナーをとめます。

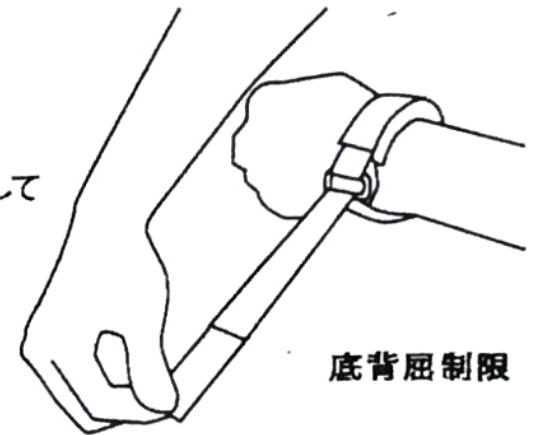

底背屈制限