

取扱説明書 【ショルダーアクション】

装着により肩関節の動きに対する肩周辺組織への負担を軽減することを目的としたサポーターです。引き上げベルトと肩甲骨の内転効果で、肩関節の動きをサポートします。

装着時間目安

使い始めは1~2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認して下さい。慣れたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避け下さい。

△注意

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 本品には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談下さい。
- 装着中に痺れや、痛みが出た場合は直ちに使用を中止し、専門医へご相談下さい。
- 本品は摩擦や汗による色落ちや色移りを起こす場合があります。淡い色との重ね着や洗濯時は十分ご注意ください。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
 - 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
 - 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。
- ※濡れた状態で放置すると、他の物に色移りする場合がありますのでご注意ください。

保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。

廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。
(地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。)

左	胸囲	胸囲	胸囲	胸囲
	107~120cm	97~110cm	82~100cm	75~85cm
右	上腕周囲	上腕周囲	上腕周囲	上腕周囲
	33~40cm	28~35cm	24~30cm	20~26cm


株式会社 **ダイヤ工業株式会社** CSセンター
〒701-0203 岡山市南区古新田1117-1
お電話でのお問い合わせ FAXでのお問い合わせ
先 0120-01-1245 0120-02-1246

Lot. No **4042391**

素材表示
ナイロン
ポリウレタン
ウレタンフォーム
ポリエステル

装着方法※ 肌に直接装着することを想定しています。衣服の上から装着すると効果が弱まる場合があります QT07-12-R02

1 本体とベルトの面ファスナーを全て外し、製品を広げます

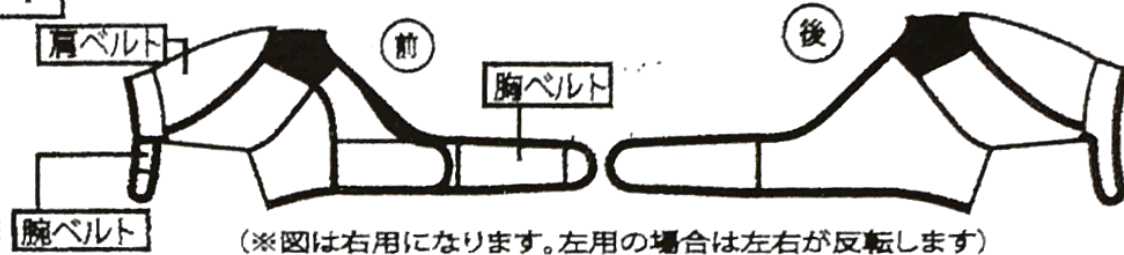

(※図は右用になります。左用の場合は左右が反転します)

2 袖に腕を通し、肩位置を合わせます

3 胸ベルトを軽くとめます


4 腕ベルトをとめます



5 肩ベルトを引張り、肩のパイル面にとめます

6 胸ベルトをとめ直します

7 下図のようになれば装着完了です

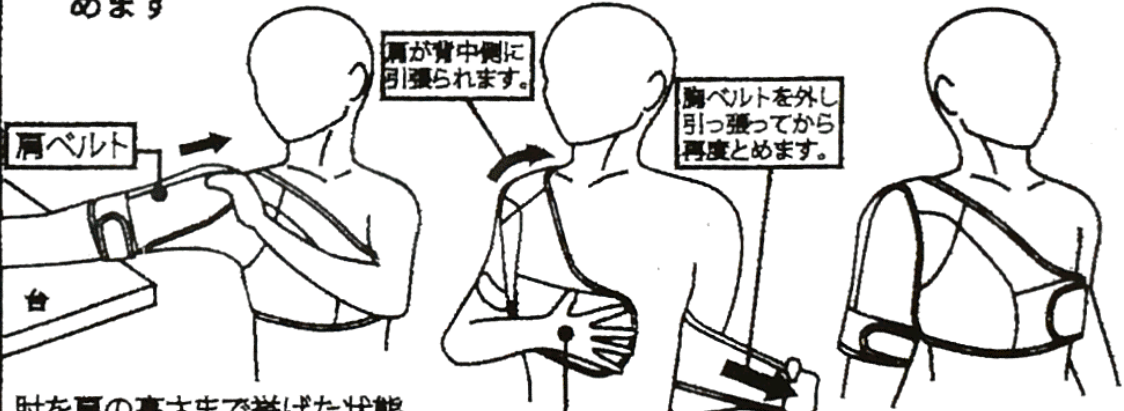

肘を肩の高さまで挙げた状態で肩ベルトを引っ張ります。腕が上がりにくい場合は台の上などに肘を乗せて行うようにして下さい。

POINT
こちらの手は引っ張らずに押さえる程度にします。

腕が引き上がり、装着側の肩が後ろに引っ張られているかご確認ください。効果が感じられない場合は、再度装着し直して下さい。