

bonbone 取扱説明書

【ソフト頸椎カラー ボーダー】

硬質ステーで頸部を支えます。肌面は吸湿速乾性と優れた放熱性、消臭効果のある素材を使用しています。芯材はクッション性、通気性に優れたパッドを使用しています。除湿効果が高く、汗をかいても肌はさらっと快適です。商品についてご不明な点がありましたら、下記宛までご連絡下さい。

装着時間目安
 使い始めは1~2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認して下さい。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避け下さい。

△ 注意

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 面ファスナーを衣服に引掛けて傷付けないようにご注意ください。
- 肌面には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談下さい。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。

廃棄方法

- 本品のステー部分にはアルミが含まれています。ステー以外の部分は布製品です。布製品は通常可燃物として廃棄して下さい。アルミは不燃物として廃棄して下さい。(地域により廃棄方法が異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。)


適用範囲	フリー	頸周囲 30~45cm*
------	-----	--------------

ご連絡先
 ダイヤ工業株式会社
 CSセンター
 〒701-0203 岡山市南区古新田1117-1
 TEL(086)282-1245 FAX(086)282-1246

素材表示
 綿、ポリプロピレン
 ポリエステル、ポリエチレン
 ポリウレタン、ナイロン
 アルミ

装着方法(※本品は肌に直接装着して頂けます。) QT06-08-R00

1 商品を広げます

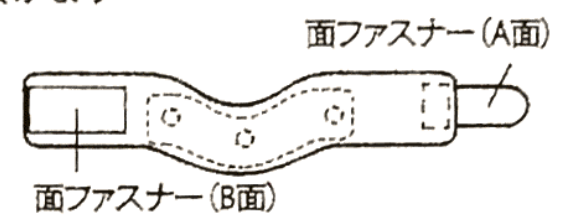


2 装着位置を合わせます



中央のステーが入った部分が首の正面にくるように首に巻き付けます。

3 面ファスナーをとめます



後頭部 苦しくないよう適度に調節しながら面ファスナーをとめます。

4 装着完了



きつ過ぎたり、緩すぎないか確認して下さい。

Lot. No 502342

検品印

