




- 親指立体縫製
- 薄手・通気性抜群
- 踵ベルトでズレ防止



取扱説明書

この取扱説明書は商品と共に保管し、ご使用に際しては必ずお読み下さい。

商品特徴

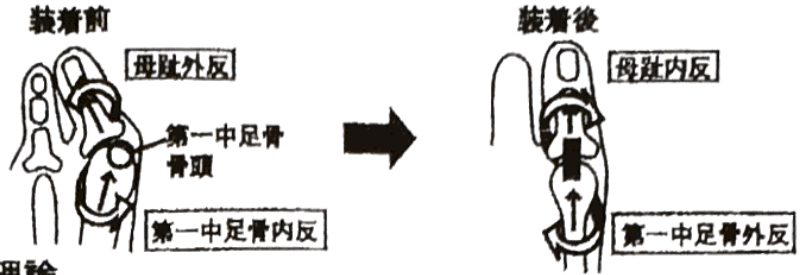

内田式理論

痛みや変形は、母趾が外反し第一中足骨が内反した状態です。歩行時に外反足（外股）になると第一中足骨骨頭は内反し、靴で圧迫・摩擦されて痛みを起こします。母趾は歩行に際し蹴り出しの役目を持ち、蹴り出し時に第一中足骨が内反し、その影響で母趾が外反します。このサポーターは母趾に内反のひねりを加えると同時に第一中足骨を正しい方向へ向けようとするものです。
 鍼メディカルうちだ 院長 内田輝和（照量）

装着方法

- 商品のサイズネームで左右を確認し、つま先から大きい輪にゆっくり通していきます。
- 親指をキャップに入れ、大きい輪に甲部分まで通します。この時キャップはねじれた状態です。
- 踵にベルトをかけます。
- 甲部分と親指の付け根を親指側へ少し回します。親指に適度にひねりが加わり指先の穴は正面になります。爪が出ないように注意します。

装着時間目安

使い始めは1～2時間程度装着し、不快感や皮膚に痒みがないか確認をして下さい。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時のご使用はお避け下さい。

素材表示

本体：ナイロン・ポリウレタン

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光、多湿を避け、風通しの良い場所に保管して下さい。高温になる場所でご使用になると変形や変色の原因となりますのでお止め下さい。
- この取扱説明書に示した目的以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 本品には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は、ご使用を中止し、専門医へご相談下さい。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し軽く手洗いして下さい。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。（地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体にご確認下さい。）

サイズ	足長（素足）	適用親指周囲	適用甲周囲
L	25～27cm	8～9cm	24～26.5cm
M	23～25cm	7.5～8.5cm	22～24.5cm
S	21～23cm	7～8cm	20～22.5cm

※サイズは靴サイズではなく足長（素足）を基準にお選び下さい。

ロットNO.

404703

ダイヤ工業株式会社 CSセンター

商品について 〒701-0203 岡山市古新田1117-1

のお問合せ先 TEL(0120)01-1245 FAX(0120)02-1246

検品印

